



# HET GEBRUIK VAN HANDSCHOENEN

## GEBRUIK HET CORRECTE MODEL WEGWERPHANDSCHOENEN

Heeft niet te veel ruimte boven de vingertop

Komt tot aan de huid tussen de vingers

Is niet te strak

Is niet te wijd rond de pols

Sla de manchet om bij nat werk! Zo vermijd je dat er water in je handschoen loopt

Manchet van 30 cm: bedekt de pols en een deel van de voorarm

### Kenmerken

- en CE
- nitril of vinyl
- gebruik zeker geen gewone of plastic latexhandschoenen!
- lange manchet, best 30 cm
- rondom helemaal glad en intact




## VERKEERDE WEGWERPHANDSCHOENEN




### Tips

- zorg dat je handen proper en droog zijn voordat je ze aantrekt
- vermijd het dragen van sieraden onder de handschoenen
- vermijd scherpe nagels als je handschoenen draagt
- om het zweet te absorberen, kan je onder de wegwerphandschoenen dunne katoenen handschoenen dragen


## HOE HANDSCHOENEN CORRECT UITDOEN

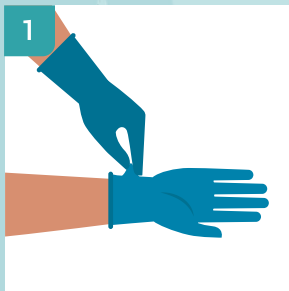


NEEM MET JE VINGERS DE BUITENKANT VAN DE HANDSCHOEN

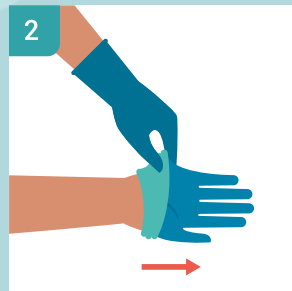


TREK DE HANDSCHOEN BINNENSTEBUITEN UIT

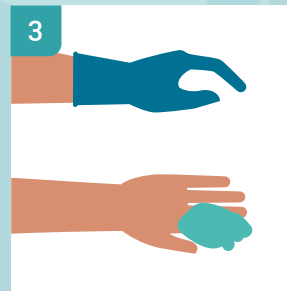


HOUD DE HANDSCHOEN VAST IN DE BAL VAN JE HAND

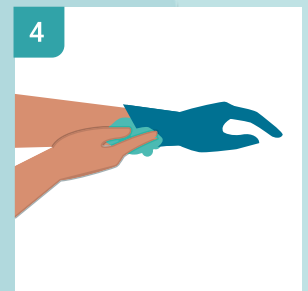

GEBRUIK DE BINNENKANT VAN DE EERSTE HANDSCHOEN OF SCHUIF TWEE SCHONE VINGERS ONDER DE TWEEDE HANDSCHOEN BIJ HET UITDOEN VAN DE HANDSCHOEN

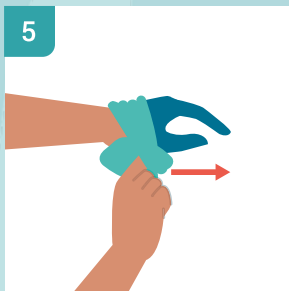

TREK DE TWEEDE HANDSCHOEN BINNENSTEBUITEN UIT ZODAT DE TWEE HANDSCHOENEN SAMEN EEN BALLETTJE VORMEN

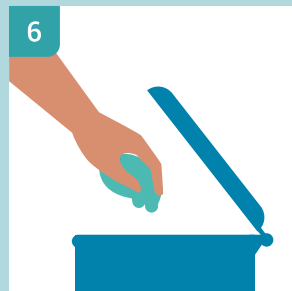

GOOI DE HANDSCHOENEN METEEN WEG IN EEN GESLOTEN VUILNISEMMER



WAS JE HANDEN EN POLSEN

### Tips:

- gooi wegwerphandschoenen na éénmalig gebruik weg
- breng een huidbeschermende handcrème aan na het dragen van de handschoenen
- verzorg wonden onmiddellijk en hygiënisch

*Stay safe!*

## HERBRUIKBARE HANDSCHOENEN

Enkel te gebruiken bij het schoonmaken en desinfecteren

- enkel persoonlijk gebruik (niet uitlenen!)
- afspoelen met water alvorens uit te trekken
- binnenkant laten uitdrogen alvorens opnieuw te gebruiken

